

MIT DREI STÄBCHEN LEBEN RETTEN!

SO FUNKTIONIERT'S

Bitte erst lesen, dann mit dem Wangenabstrich beginnen!
Das dauert ca. 15 Minuten.


ACHTUNG


Erst eine Stunde nach dem Essen, Trinken und / oder Zähneputzen kannst Du loslegen – nur so wird Dein Test nicht beeinflusst!

Bist Du auf einem unserer Events, kannst Du ihn direkt bei unseren MitarbeiterInnen abgeben.


Machst Du den Test per Post:

Platziere einen der Barcode-Aufkleber an der rechten unteren Ecke der Außenseite des kleinen Umschlags. Dann einfach alles zusammen mit Deiner Einwilligungserklärung in den großen Briefumschlag eintüten, zukleben und an uns schicken!

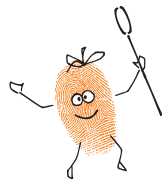

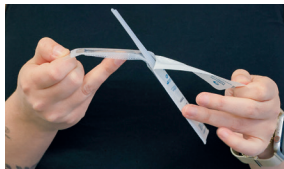

STEP 1: Öffne die sterile Verpackung mit den drei Stäbchen. Achte darauf, die wattierte Seite der Stäbchen nie zu berühren!

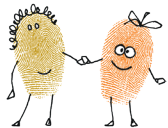

STEP 2: Nimm Stäbchen 1 und streiche und drehe den Wattekopf mit ein wenig Druck mindestens eine Minute lang auf der Innenseite der linken Wange sowie zwischen Zähnen und Wange oben und unten. Mit Stäbchen 2 machst Du das Gleiche entweder gleichzeitig oder danach auf der rechten Seite.



STEP 3: Stäbchen 3 streichst und drehst Du ebenfalls mindestens eine Minute lang sowohl auf der Innenseite der Ober- als auch der Unterlippe und dann auch noch mal kurz auf der Innenseite der linken und rechten Wange!



STEP 4: Lass die drei Wattestäbchen jetzt entweder in Deiner Hand oder in einem Gefäß zehn Minuten trocknen! Dabei berührst Du bitte auch hier nie das Abstrichköpfchen!



STEP 5: Stecke die Stäbchen jetzt vorsichtig in den kleinen Umschlag und klebe ihn zu.



Noch mehr Informationen findest Du hier:



DU HAST ES GESCHAFFT!

Wir bedanken uns bei Dir ganz herzlich im Namen sämtlicher BlutkrebspatientInnen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit!

Für sie kann Deine Typisierung und gegebenenfalls spätere Stammzellspende lebensrettend sein!